



НАБОР ДЛЯ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА ЧАША И ШПАТЕЛЬ / ШПРИЦ

Простой набор для замешивания и введения костного цемента

- Чаша и шпатель для замешивания цемента
- Шприц со стандартным кончиком для ретроградного введения цемента в диафиз кости
- Шприц с удлиненным кончиком для антеградного введения цемента в диафиз кости

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Шприцы : полипропилен, нитрил, силикон

Чаша и шпатель : полипропилен

- Легко использовать
- Экономичный
- Одноразовый

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ВНИМАНИЕ:

Артикулы T060402, T060404, T060405 должны быть стерилизованы.

Удалить полиэтиленовую упаковку (соответствует обычным стандартам).

Стерилизовать в автоклаве при 134°C в течение 18 минут.

Артикул T060403 поставляется в стерильной упаковке.

Каждый набор упакован в двойной отслаиваемый пакет и стерилизован оксидом этилена. Стерильность сохраняется в течение срока годности, если упаковка не открыта и не повреждена.



ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в оригинальной нераскрытой упаковке, при комнатной температуре, в сухом, чистом помещении.

Разового использования.

ОПИСАНИЕ		РАСФАСОВКА	Артикул
ШПРИЦ СО СТАНДАРНЫМ НОСИКОМ	Шт. : 1	Не стер./ПЭ пакет	T060402
ШПРИЦ С УДЛИНЕННЫМ НОСИКОМ	Шт. : 1	Не стер./ПЭ пакет	T060405
Набор ЧАШ И ШПАТЕЛЕЙ	Шт. : 10	Не стер./ПЭ пакет	T060404
ЧАША И ШПАТЕЛЬ	Шт. : 1	Стер./двойной пакет	T060403



Classe I STERILE



Дистрибьютор в РФ:

ООО «Госпитальный консалтинг»
127473 г.Москва
ул. Краснопролетарская д.16, стр.3,
подъезд 8, офис 3/12
Телефон/факс (495) 721 37 73
info@ch-ru.ru, www.ch-ru.ru

Head offices:

8, rue du Corps Franc-
Pommiès 65500 VIC en
BIGORRE (France)
Tél (33) 5 62 96 88 38
Fax (33) 5 62 96 28 72

Manufactured by

